

KANGAROO™

SET DE NUTRICIÓN ENTERAL DOBLE CON PUNZON SPIKE - BOLSA DE IRRIGACIÓN 1000 ML BOMBA E-PUMP

Ficha Técnica

Marca:	KANGAROO™
Clasificación de riesgo:	IIB
Método de esterilización:	NE
Vida útil:	48 meses

Set para suministrar nutrición enteral, cuenta con punta proximal con punzón spike, apto para utilizar con nutrición preenvasada o fórmulas listas para colgar y bolsa de irrigación que permite programar la bomba para que realice el lavado de la sonda después de cada ingesta y/o hidratar al paciente fijando intervalos y volumen a administrar de agua.

El conector del set de alimentación es incompatible con las conexiones luer lock o IV, lo que reduce el riesgo de una conexión o infusión accidental. Disponible con conexiones enterales seguras para abordar la alerta de evento Sentinel de conexiones erróneas de tuberías de la JCAHO de 2006.

1. Información básica del producto

- Material de Poli cloruro de vinilo (P.V.C.) y tubo de silicona transparente.
- Todas las bolsas de alimentación Kangaroo™ son libres de DEHP (Di-2-Etilhexilftalato).
- El tubo de silicona se adhiere al rotor y permitiendo girar y mezclar la fórmula nutricional.
- Reglilla numérica y transparencia de la bolsa: permite registro volumétrico de la fórmula a infundir y evaluar la homogeneidad de la fórmula nutricional.
- Set punzón más bolsa de agua: Garantiza al paciente la administración de nutrición y a su vez irrigación.
- Empaque individual.
- **Puerto distal conector ENfit** que atiende lineamientos internacionales para promover la seguridad del paciente.
- Apto para uso con Bombas ePump.

2. Precauciones:

- Este es un set diseñado para bebés, niños y adultos con algún trastorno que requiera nutrición y/o Hidratación por vía Enteral.
- No está destinado para uso en Neonatos.



3. Indicaciones de Uso

1. Lávese las manos
2. Retire la cubierta del Spike e insértela en el envase de alimentación enteral correspondiente(LPC), girando a la derecha hasta que quede firme.
3. Cuelgue el envase de alimentación. La parte inferior del contenedor de alimentación debe estar 46 cm por encima de la parte superior de la Bomba de alimentación.
4. Llene la bolsa de irrigación con la cantidad deseada de agua para irrigar / hidratar. Cierre la bolsa y cuélguela.
5. Oprima el botón en el tablero de la bomba de Encendido/Apagado
6. Instale el set de nutrición en la Bomba de alimentación enteral Kangaroo Epump. Y programe la bomba para nutrición e irrigación.
7. Confirme que el adaptador esté conectado únicamente a un puerto enteral y no a un set intravenoso.
8. Proceda a administrar la fórmula.

4. Nota

- * Este set sirve solo para administrar nutrición enteral.
- * Es recomendable cambiar el equipo cada 24 horas.
- * La instalación del set se puede hacer con la Bomba encendida o apagada.
- * Si va a retirar el set debe hacerlo con la bomba de Alimentación Apagada para evitar que se desalinee la válvula del set.

5. Presentación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
775100	Set de alimentación con punzón tipo spike y bolsa de irrigación 1000ml	Caja x 30 Unidades